


SPECULUM DE CUSCO STERILE A USAGE UNIQUE

Caractéristiques

- Les spéculums de CUSCO, en polystyrène transparent haute résistance, possèdent une surface lisse et arrondie grâce à un traitement anti-aspérités et polissage en fin de production.
- Grâce au système de quart de tour de la vis, le blocage des valves est rapide, précis et silencieux.
- La paroi vaginale est parfaitement visible au travers des valves transparentes.

Réf.	Taille	Couleur de la vis	Conditionnement par carton (unités)
705.01	« Virginal » Ø 16 mm	Verte	100
703.01	« Standard » Ø 24 mm	Bleu	
701.01	« Grand » Ø 30 mm	Blanche	

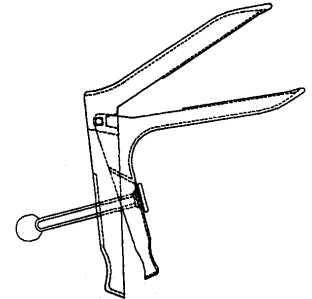

Utilisation

Spéculum gynécologique de type CUSCO stérile à usage unique.

Instrument utilisé en gynécologie et en obstétrique qui permet d'élargir la cavité vaginale par l'écartement des parois du vagin, afin d'examiner le col utérin et le vagin et de donner un accès au canal cervical et à la cavité utérine pour pratiquer de multiples examens ainsi que de petites interventions chirurgicales.

Mode d'emploi :

- Déchirez la poche au niveau de l'encoche d'ouverture ;
- Prenez en main au niveau de « la gâchette » et non pas par les valves ;
- Introduire le spéculum dans le vagin de la patiente ; une fois mis en place, définir l'ouverture souhaitée, le spéculum se bloque grâce au pas de vis, en procédant à un quart de tour ;
- Procédez à l'examen gynécologique et/ou à la petite chirurgie ;
- Après utilisation jetez le dispositif et son emballage dans un réceptacle dédié au traitement des déchets à risque infectieux.

Avantages :

Pour la patiente :

- Plus de confort grâce à un contact plus doux et garanti sans choc thermique ;
- Bord arrondi et absence de bruit, lors de la manipulation ;
- Impact psychologique réduit grâce à l'utilisation d'un dispositif à usage unique.

Pour le praticien :

- Transparence parfaite ;
- Adaptabilité à la morphologie de la patiente ;
- Vis de sécurité avec blocage rapide ;
- Code couleur permettant de se repérer rapidement parmi les différentes tailles disponibles ;

Pratique et sans préparation, économique à l'usage.

Stérilisation

Mode : Oxyde d'Ethylène - EO (Stérilisé par : OIARSO S. COOP.)

Conservation : 5 ans après la date de stérilisation



Conformité

CE 0318 marquage CE selon la Directive Européenne 93/42/CEE - Classe I

Certification ISO : Bexen® a mis en place et maintient un système qualité conformément aux exigences de la Norme ISO 9001.

Distribué par	Fabriqué par
L.D.T.A.S. APOTECNIA – KELIS MEDICAL 51 – 55 Avenue des Templiers 13400 Aubagne	OIARSO S. COOP. (Bexen®) en Espagne