

FICHE TECHNIQUE :

## Pince à Déclamper - PHARMAPLAST

Référence commerciale : **84006022**

### Indication

Retrait du clamp ombilical de bar

### Caractéristiques

- Longueur : 125 mm
- Couleur verte nettement visible pour faciliter le repérage
- Section tranchante protégée pour éviter tout risque de coupure de la peau du bébé
- Bonne prise par l'œil du clamp ombilical

### Matériaux constitutifs

- Polyacétal renforcé de couleur verte
- Lame : acier inoxydable
- **NE CONTIENT PAS DE LATEX.**

### Recommandations d'utilisation

- Le clamp de bar ne peut être ré-ouvert manuellement après sa pose. L'utilisation d'une pince à déclamper est nécessaire pour ré-ouvrir le clamp.
- Positionner la pince à déclamper dans l'œil du clamp et sectionner le clamp.
- Il est fortement déconseillé d'utiliser tout autre objet tranchant pour ce geste.

### Conditionnement

- Emballage pelable unitaire stérile
- Boîte de 25 unités, carton de 200 unités

### Stérilisation

- Oxyde d'éthylène
- Validité : 5 ans

### Normes

Classe : I stérile

Lieu de fabrication et de stérilisation : Danemark

Certification CE ; Organisme notifié et No. Certificat :

❖ CE 0459 ; LNE/G-MED ; 2015/B2P3/1 ; Limite de validité : 20.10.2013

Certification ISO ; Organisme notifié et No. Certificat :

❖ ISO 13485:2003 ; LNE/G-MED ; 2015/13485/1 ; Limite de validité : 13.08.2014