



BD Discardit™ II

Seringues 2 pièces sans aiguilles
Stérile, usage unique



Classe I selon la directive européenne 93/42/CEE sur les dispositifs médicaux.

Marquage CE :

Selon la directive européenne 93/42/CEE (procédure de conformité annexe V)

- Certificat : n° 2000 06 0272CP ; certifié par Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (n° 0318)
- Fabricant : Becton Dickinson, Fraga, Espagne
- Certification : EN-ISO 13485 : 2003
Certificat n° 98 06 2006 EN certifié par AEMPS (n° 0318) & ISO 14001 : 2004, Certificat n° ES036325-1 par Veritas Certification España ; ISO 9001 : 2008, Certificat n°ER-0097/1994

- Stérilisation : Oxyde d'éthylène (concentration d'ETO : 580 mg/l)
- Condition de stockage : Tenir au sec, à l'abri du soleil
- Péremption : 5 ans après stérilisation

Indications :

A utiliser pour des procédures d'injection et/ou pour le prélèvement des fluides médicaux.

Trois catégories d'applications :

- Contact direct avec le patient (ex. : injection intraveineuse)
- Contact indirect avec le patient (ex. : ligne de perfusion, robinets)
- Pas de contact avec le patient (ex. : transfert de médicaments)

Composition des différents éléments :

- Corps de la seringue : Polypropylène (PP)
- Piston : Polyéthylène (PE)
- Emballage individuel : Papier de 60 g/m², transparent
Film en Polyéthylène (PE) / Polyamide (PA)

Certifié :

- Sans Latex
- Sans Phtalate
- Sans DEHP

BD Discardit™ II

Seringues 2 pièces sans aiguilles - Stérile, usage unique, sans latex

Caractéristiques Générales :

- La seringue présente une **force de glissement réduite** à 300 g permettant une **avancée plus régulière du piston** et un positionnement plus facile du piston sur la graduation désirée.
- Pour la précision et la sécurité, le corps est **transparent**.
- **Tige de pression sécable : évite la réutilisation** extra hospitalière des seringues à usage unique.
- Précision de la graduation adaptée aux besoins des utilisateurs.
- Ces seringues conviennent à toutes les injections contrôlées manuellement. **Ne pas utiliser sur pousse-seringue.**
- Produit apyrogène.
- Les seringues sont conformes aux exigences de la norme NF EN ISO7886-1 "Seringues hypodermiques stériles, non réutilisables" et résistent à la pression lors d'une utilisation habituelle.

Conformément à la norme NF EN ISO7886-1, les seringues sont munies d'une bague de rétention, moulée à l'intérieur du corps de la seringue, afin d'éviter que le piston ne sorte accidentellement du corps de la seringue lors du remplissage de celle-ci.

Il n'est pas recommandé de retirer complètement la tige du piston du corps de la seringue pour la remplir « par l'arrière », et de réintroduire le piston par la suite dans le corps de la seringue.

Caractéristiques Techniques :

				Corps de la seringue				Piston		total
Références	Désignation	Embout	Graduation	Longueur mm	Ø externe mm	Ø interne mm	Poids g	Longueur mm	Poids g	Poids g
300928	2 ml – H 902 S	centré	au 0,1 ml	51,65	10,00	8,80	1,24	63,55	0,93	2,17
309050	5 ml – H 905 S	excentré	au 0,2 ml	63,26	13,56	12,30	2,06	76,45	1,79	3,85
309110	10 ml – H 910 S	excentré	au 0,5 ml	76,33	16,92	15,60	3,17	90,55	2,82	5,99
300296	20 ml – H 920 S	excentré	au 1 ml	89,60	21,52	20,10	5,14	103,00	4,96	10,11

Conditionnement :

Réf. 300928 - Boîte carton / Suremballage carton / Palette filmée : 100/ 3000/ 36000 unités – code couleur : bleu

Réf. 309050 - Boîte carton / Suremballage carton / Palette filmée : 100/ 1800/ 21600 unités – code couleur : rouge

Réf. 309110 - Boîte carton / Suremballage carton / Palette filmée : 100/ 1200/ 14400 unités – code couleur : orange

Réf. 300296 - Boîte carton / Suremballage carton / Palette filmée : 80/ 960/ 11520 unités – code couleur : vert



BD Medical
Medical Surgical Systems
11, rue Aristide-Bergès
38800 Le Pont-de-Claix
Tél. 04 76 68 36 36
Fax 04 76 68 55 61
www.bd.com/france