



Classe IIa

selon la directive européenne 93/42 CEE sur les dispositifs médicaux.

Marquage CE :

Selon la directive européenne 93/42 CEE (procédure de conformité annexe II)

- Certificat n° 01738 : certifié par BSI (n° 0086)

Fabricant :

- Lieu de fabrication : Becton Dickinson, Nogales, Sonora, Mexique

- Certification :

ISO 13485 : 2003 certificat n° FM 71665, certifié par BSI

- Stérilisation : Oxyde d'éthylène(ETO)

- Péremption :

BD Intima™ Droit : 5 ans après stérilisation

BD Intima™ Y : 4 ans après stérilisation

BD Intima™ Droit BD Intima™ Y

Microperfuseurs avec cathéter

Matériel stérile, usage unique

Indications :

Le BD Intima™ est un microperfuseur à ailettes avec un cathéter court en Vialon™ et une tubulure intégrée.

Le BD Intima™ est recommandé pour :

- La perfusion intraveineuse de longue durée.
- La perfusion de veines fragiles. Il est utilisé dans tous les services (néonatalogie, oncologie, gériatrie, médecine interne,...).
- Les techniques de cathétérisation sans contact avec le sang (maladies infectieuses).
- L'hospitalisation à domicile (HAD).

Composition des différents éléments :

- Cathéter : Vialon™ radio-opaque / Polyuréthane (PUR)
- Embase : Polypropylène (PP)
- Aiguille : Acier inoxydable
- Prolongateur : Polychlorure de Vinyle (PVC)
- Ailettes : Polychlorure de Vinyle (PVC)
- Site d'injection : **Sans latex**

Certifié :

- Sans Latex
- Sans Phtalate (référence 383236)

BD Intima™ Droit

BD Intima™ Y

Microperfuseurs avec cathéter

Matériel stérile, usage unique

Caractéristiques Générales :

Le BD Intima™ est un cathéter fabriqué en **Vialon™**, biomatériau hémocompatible développé par BD, qui offre des qualités exceptionnelles de pénétration, d'intégrité de chanfrein et de tolérance.

- **Double ailette de fixation** de type "épicrânien" assurant une très grande sécurité de fixation chez les patients mobiles ou agités.
- **Prolongateur souple, 70 mm** : autorise toutes les manipulations à distance du point de ponction afin de limiter le risque septique ; Le BD Intima™ peut ainsi être laissé plus longtemps en place par rapport à un cathéter traditionnel.
- **Le BD Intima™ Droit** : peut être utilisé partout où le BD Insyte™ (cathéter court veineux droit) peut être mis en place ; il est équipé d'un cône BD Luer-Lok™ permettant la connexion avec tous les matériels munis d'un embout luer.
- **Le BD Intima™ Y** : est équipé d'une sortie en Y permettant de bénéficier de deux sites d'injection (administration en "flush" de médicaments) ; la mise en place se fait en évitant le contact avec le sang.
- Site d'injection **sans latex**, non amovible pour BD Intima™ Y.
- Cathéter **radio-opaque** et apyrogène.
- **La codification couleur de l'embase** permet une identification immédiate du diamètre du cathéter.
- Volume mort (Prolongateur) : **0,2 ml**.

Caractéristiques Techniques

| Références | Références | Code | | Cathéter | | | | Aiguille | | Débits |
|------------------|---------------|---------|-------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|--------|
| | | | | Ø externe | Ø interne | Longueur | Longueur | Ø externe | Ø interne | Eau |
| BD Intima™ Droit | BD Intima™ Y* | Couleur | Gauge | mm | mm | mm | inch | mm | mm | ml/min |
| 383244 | 383246 | Vert | 18 | 1,3 | 1,0 | 25 | 1 | 0,9 | 0,6 | 82 |
| - | 383236 | Rose | 20 | 1,1 | 0,8 | 25 | 1 | 0,7 | 0,4 | 55 |
| 383221 | 383223 | Bleu | 22 | 0,9 | 0,5 | 19 | ¾ | 0,5 | 0,3 | 36 |
| 383211 | 383213 | Jaune | 24 | 0,7 | 0,5 | 19 | ¾ | 0,5 | 0,3 | 22 |

* avec site d'injection

Conditionnement des cathéters :

Boîte/Carton : 25/200

Palette : 3 600 et 12 800 pour la réf. 383322 et 16 000 pour la réf. 383335



BD Medical
Medical Surgical Systems
11, rue Aristide-Bergès
38800 Le Pont-de-Claix
Tél. 04 76 68 36 36
Fax 04 76 68 55 61