

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Pansement 12x14cm avec fenêtre transparente non adhésive

REF: PADF1214

Dimensions totales : 12x14cm avec fenêtre non adhésive 7x9cm

Destination :

Fixation des cathéters et des dispositifs percutanés.
Fixation et protection de pansements absorbants.

Propriétés :

Imperméable aux bactéries, il élimine les risques de contaminations extérieures.
Perméable à la vapeur d'eau (>400g/m²/24h selon norme CEN13726-2), il évite ainsi les risques de macération, et permet un maintien durable.
Transparent et non adhésif au centre, il permet la surveillance du point de ponction et la détection d'éventuelles infections ou complications.
Hypoallergénique, il respecte les peaux sensibles.

Composition :

Film Polyuréthane coextrudé 25µ.
Masse adhésive acrylique.
Protecteur en papier siliconé blanc.
Non tissé en polyester blanc élastique.
Free Latex/Sans Latex

Précautions d'emploi :

Vérifier l'intégrité de l'emballage individuel de stérilité avant usage.
Ne pas utiliser le pansement sur les plaies ou les points de ponction infectés, les plaies saignantes ou très exsudatives : l'hémostase de la plaie doit être terminée avant d'appliquer le film.
Surveiller régulièrement la plaie ou le point de ponction et les zones avoisinantes, afin de détecter d'éventuels signes d'infections comme une douleur, une rougeur, un œdème, une odeur ou une suppuration inhabituelle.
Usage unique.
Ne pas re-stériliser.


Stockage et durée de conservation :

A conserver à température ambiante, à l'abri de la lumière et de l'humidité.
Durée de conservation : 5 ans

Présentation unitaire: 1 Blister pelable 15x19cm (1 face en papier médical / 1 face film PET/PE transparent)

Conditionnement : 50 unités par étui / 950 unités par carton de groupement.

Stérilisation : Oxyde d'éthylène

Fabricant : France Partenaires Médical  0459.

Classification directive 93/42/CEE : I stérile.