

FICHE TECHNIQUE

Sondes de Foley pré-connectées avec poche 2 litres

CARACTERISTIQUES GENERALES

| Sondes de Foley pré-connectées avec poche 2 L système clos Securmed | | Boite |
|---|---|-------|
| 0100111C22BA | Sonde Foley Latex siliconé CH 12 pré-connectée poche 2 L système clos SM4L - Site avec aiguille | 50 u |
| 0100111C22BB | Sonde Foley Latex siliconé CH 14 pré-connectée poche 2 L système clos SM4L - Site avec aiguille | |
| 0100111C22BC | Sonde Foley Latex siliconé CH 16 pré-connectée poche 2 L système clos SM4L - Site avec aiguille | |
| 0100111C22BD | Sonde Foley Latex siliconé CH 18 pré-connectée poche 2 L système clos SM4L - Site avec aiguille | |
| 0100111C22BE | Sonde Foley Latex siliconé CH 20 pré-connectée poche 2 L système clos SM4L - Site avec aiguille | |
| 0100112E21CA | Sonde Foley 100 % Silicone CH 12 pré-connectée poche 2 L système clos SM7 - Site sans aiguille | 40 u |
| 0100112E21CB | Sonde Foley 100 % Silicone CH 14 pré-connectée poche 2 L système clos SM7 - Site sans aiguille | |
| 0100112E21CC | Sonde Foley 100 % Silicone CH 16 pré-connectée poche 2 L système clos SM7 - Site sans aiguille | |
| 0100112E21CD | Sonde Foley 100 % Silicone CH 18 pré-connectée poche 2 L système clos SM7 - Site sans aiguille | |
| 0100112E21CE | Sonde Foley 100 % Silicone CH 20 pré-connectée poche 2 L système clos SM7 - Site sans aiguille | |

Indications des sondes :

Les sondes « latex » siliconées ont les parois internes et externes revêtues d'une couche permanente d'élastomère de silicone qui facilite l'introduction et réduit les phénomènes d'incrustation diminuant ainsi les risques d'inflammation du tissu urétral.

Ces sondes conviennent pour une utilisation limitée à quelques jours.

Les sondes « sans latex » sont 100% silicone. Destinées à un drainage à long terme (3 à 4 semaines maximum) elles sont intégralement en élastomère de silicone. Leur composition assure une excellente tolérance tissulaire et prévient les incrustations. Les parois minces en silicone pur garantissent un parfait drainage.

Ces sondes sont fixées de façon irréversible aux poches, toute déconnection est impossible.

Attention : Ne pas clamber ou plier ces sondes.
Pour arrêter l'écoulement urinaire, utiliser un fosseset.

Indications des poches :


Systèmes clos stériles interne et externe.

Le robinet en croix permet de vidanger la poche sans risque de blocage. Il évite, également, tout contact avec l'urine.

Son système de fixation présente des crochets plastiques pour assurer le montage rapide et facile de la poche sur les lits et fauteuils roulants.

La SM7 est, par sa conception technique, préconisée pour une durée de pose d'environ 21 jours, tandis que la poche SM4L est préconisée pour une durée de pose d'environ 7 jours.

La chambre de gouttage de la poche SM7 est munie d'un filtre à air, d'un piège à bactéries et d'une technologie spécifique permettant d'éviter le retour des urines donc des infections rétrogrades par remontée de l'urine par capillarité. Son site de prélèvement sans aiguille permet de ponctionner les urines avec une seringue embout luer sans risque de piqûre accidentelle et avec un gain de temps.

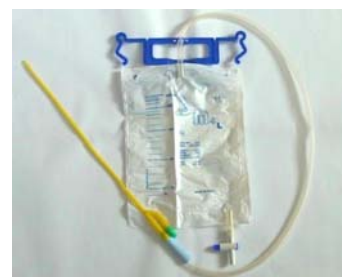

INFORMATIONS TECHNIQUES

Stérilisation : oxyde d'éthylène

Fabriqué par : Securmed (Italie)

Normes CE 0123

Classe IIa

Sans LATEX

L.D.T.A.S APOTECNIA - KELIS MEDICAL

51-55 Avenue des Templiers - ZAC de Napollon - 13400 Aubagne

Fax : 04 42 03 55 02

e-mail : serviceclient@apotecnia.com

www.apotecnia.com

www.kelis-medical.com

serviceclient@kelis-medical.com